

SWAB COM PONTA DE NYLON FLOCADO**Apresentação**

Swab estéril com ponta de nylon flocado e haste plástica quebrável em qualquer ponto.

Método de esterilização

Óxido de etileno.

Aplicação

Swab para coleta de amostras clínicas de nasofaringe destinadas à realização de exames microbiológicos.

Pode ser utilizado no monitoramento ambiental para coleta de amostras de superfícies.

Princípio

Produzido com ponta de nylon flocado grau médico atóxico, sem material fluorescente, que impede interferências em ensaios baseados em qPCR. Possui haste plástica quebrável em qualquer ponto.

Modo de usar

Realizar a coleta da amostra de acordo com a metodologia adotada pelo laboratório. Após a coleta, colocar o swab em um tubo com meio de transporte adequado, quebrar a haste, fechar a tampa do tubo e encaminhar a amostra para o laboratório.

Precauções e cuidados especiais

Produto destinado apenas para o uso em diagnóstico *in vitro*.
Uso restrito por profissionais. Não inalar ou ingerir.
Não utilizar o produto fora do prazo de validade, com sinais de contaminação e com alterações de cor. Na presença de contaminação o produto deve ser imediatamente descartado.
Não utilizar o produto com embalagem rompida ou violada.

Conservação

Transporte e conservação em temperatura ambiente em local seco e ao abrigo da luz.

Descarte do produto

Após o uso, o produto deve ser tratado na unidade geradora antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme as regulações oficiais.

Garantia da Qualidade

A bioBoaVista garante a qualidade de seus produtos desde que sejam utilizados conforme as respectivas instruções de uso e em referências nacionais e internacionais. A bioBoaVista não se responsabiliza pela utilização de seus produtos para outra finalidade diferente da descrita e aprovada pela companhia. Todos os diagnósticos clínicos devem ser analisados em conjunto com evidências clínicas e não apenas com resultados laboratoriais.